

Telelupa (CCTV) Magnilink modelo Albatros del CAE

El objetivo para el que se diseñó este producto de apoyo es para permitir a personas con dificultades de visión, poder leer con ampliación los libros y otros materiales de la biblioteca



Telelupa Magnilink modelo Albatros

Ubicación

Edificio Biblioteca General, 1ª planta

Teléfono 1ª planta: 965 90 34 00 ext. 2814

Correo electrónico: bibli.fl arroba ua.es

Contacto en el CAE

CAE ext. 3873 – 9402

Correo electrónico: cae arroba ua.es




Controles de izquierda a derecha:

- Botón Rojo: encendido/apagado
- Rueda negra: línea horizontal de guía para la lectura (opcional)
- Rueda dentada Azul: cambio de contraste (fondo azul, blanco y negro, grises, etc.)
- Rueda negra: brillo



Controles de izquierda a derecha:

- Palanca Azul: zoom
- Rueda (en el lateral): nitidez

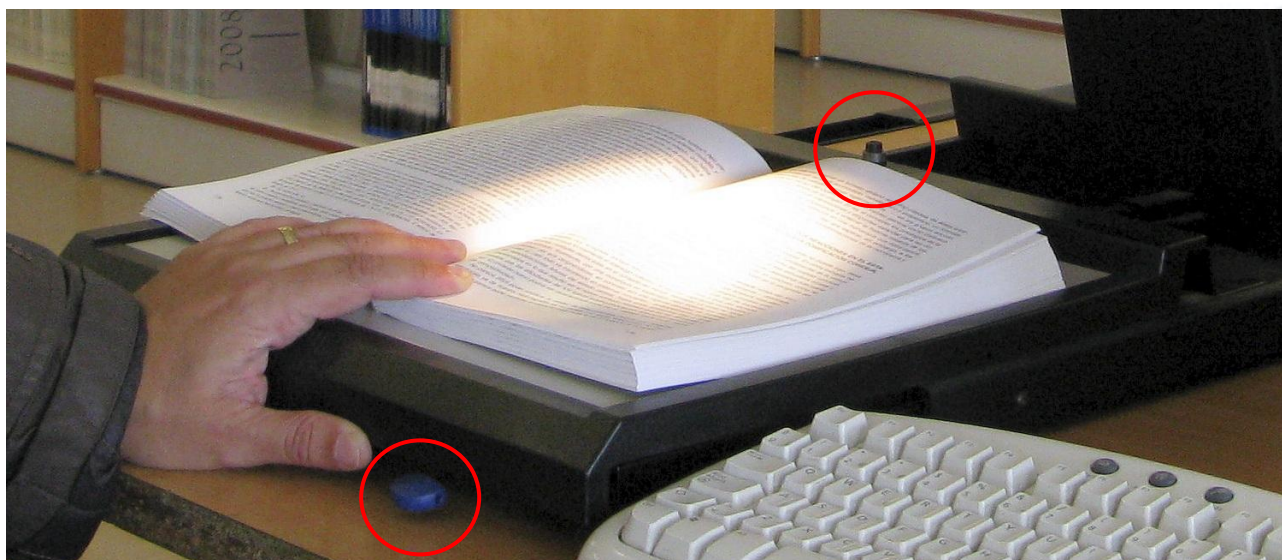

Controles de bandeja portatextos (libros, revistas, etc.):

- Palanca sin caperuza (al fondo de la bandeja): girar izquierda/derecha para bloquear/desbloquear la bandeja
- Palanca azul (en el frente de la bandeja): gradualmente controla el deslizamiento horizontal de la bandeja para mover los textos